

Testato e raccomandato dagli Otorini

PHYSIOMER[®]

OTO

100%
Acqua di Mare



Adulti e bambini dai 6 mesi di età

L'orecchio si protegge dalle aggressioni esterne secernendo una «barriera filtro»: il cerume. Per la maggior parte delle persone, il cerume si scioglie naturalmente all'esterno del condotto uditivo attraverso il sistema autopulente dell'orecchio. L'aspetto e la quantità di cerume prodotta varia da individuo a individuo. Di conseguenza, alcune persone producono molto cerume.

Diversi fattori (come l'uso di un apparecchio acustico, l'esposizione alla polvere, la presenza di una barriera di peli o la forma stretta del condotto uditivo nei bambini) impediscono all'orecchio di rimuovere il cerume in eccesso, che si accumula gradualmente nel condotto uditivo e può causare blocchi ostruttivi. La presenza di cerume in eccesso è associata a disagio come prurito, lieve dolore, riduzione dell'udito, sensazione di ronzio o vertigini...

PHYSIOMER OTO[®] è appositamente progettato per pulire delicatamente l'orecchio, e quindi:

- Rimuovere il cerume in eccesso e i detriti dai tappi di cerume
- Prevenire la formazione dei tappi di cerume

Contenuto:

- Un flacone da 115 ml senza gas propellente.
- 1 erogatore auricolare a forma di otoscopio per un uso confortevole e per preservare l'integrità del timpano.

Composizione

Formula naturale.

Ingredienti: 100% soluzione di acqua di mare isotonica (equivalente a 9 g/l di cloruro di sodio). Sterile e senza conservanti.


Modalità d'azione:

- Contiene naturalmente bicarbonati per eliminare e sciogliere il cerume e le impurità (residui di pelle, polvere).
- **PHYSIOMER OTO[®]** consente al sistema autopulente dell'orecchio di agire correttamente.


Posologia raccomandata

Adatto per l'uso quotidiano in adulti, bambini e neonati dai 6 mesi di età.

- **Per persone inclini alla produzione di cerume, all'esposizione alla polvere o ai prodotti chimici, per pulire e prevenire la formazione dei tappi di cerume:** 1 spruzzo in ciascun orecchio, 2-3 volte a settimana.
- **In caso di blocco dell'orecchio:** 2-3 spruzzi nell'orecchio, ogni giorno per 7 giorni. Per favorire il flusso di detriti di cerume, utilizzare lo spray dopo l'applicazione di gocce cerumenolitiche.
- **Per gli utilizzatori di apparecchi acustici per garantire il funzionamento ottimale dell'apparecchiatura:** 1 spruzzo in ciascun orecchio, 2-3 volte a settimana.

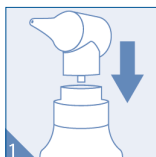

Premere l'erogatore

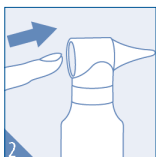

Attendere



Inclinare



Asciugare

Istruzioni per l'uso

Si raccomanda la supervisione di un adulto per l'uso nei bambini.

Solo per uso esterno. Per comodità, utilizzare **PHYSIOMER OTO[®]** durante la doccia o il bagno.

1. Montare l'erogatore sulla parte superiore del flacone.
2. Posizionare il dito indice sull'erogatore.
3. Inserire delicatamente l'erogatore nell'orecchio mantenendo la testa in posizione verticale ed eseguire uno spruzzo da 1 a 3 secondi.
4. Lasciare la soluzione nell'orecchio per 10 secondi.
5. Inclinare delicatamente la testa per consentire alla soluzione di defluire.
6. Asciugare delicatamente l'orecchio esterno con un panno o un fazzoletto pulito.
7. Ripetere la procedura nell'altro orecchio.

Sciagquare l'erogatore con acqua calda dopo ogni utilizzo.

In caso di eccessiva produzione di cerume, lasciare agire il prodotto per 10 minuti. Ripetere la procedura fino a 4 volte se necessario.



Effetti collaterali prevedibili

Potresti provare una sensazione di ostruzione all'orecchio che scompare rapidamente una volta inclinata la testa per consentire al prodotto di fuoriuscire.

Avvertenze e precauzioni

- Consultare un medico prima dell'uso se si è diabetici o si hanno problemi di immunosoppressione.
- Non inserire alcun oggetto (bastoncini di cotone, penne...) nell'orecchio prima o dopo l'utilizzo.
- Se si è soggetti a vertigini, utilizzare da seduto.
- In caso di sensazione persistente di orecchio bloccato, **INTERROMPERE** l'uso e consultare un medico.

Utilizzare a temperatura ambiente tra 20 °C e 25 °C per evitare la sensazione di freddo.
È possibile far scorrere la bottiglia sotto l'acqua calda per riscaldare la soluzione.

- Non asciugare il canale uditivo troppo vigorosamente dopo l'uso, poiché ciò potrebbe provocare irritazione o infiammazione.
- Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Non utilizzare se la confezione è differente dall'aspetto originale.
- Solo per uso esterno.

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di dolore all'orecchio, infezione all'orecchio, otite del nuotatore, timpano perforato, tubi di compensazione della pressione, disturbi dell'equilibrio, intervento chirurgico all'orecchio o se si ha un corpo estraneo nell'orecchio o un complicato e/o ostruttivo blocco da cerume (difficoltà nel sentire, dolore, ronzio, sensazione di blocco, sordità temporanea dopo il bagno o la doccia).

Dispositivo Medico

Data prima apposizione del marchio  : Gennaio 1999 - Revisione Marzo 2020

DISTRIBUTORE:

Perrigo[®]

Perrigo Italia
S.r.l.
Viale dell'Arte, 25
00144 Roma - ITALIA

 Laboratoire de la Mer
Avenue du Général Patton
ZAC de la Madeleine
35400 Saint-Malo - FRANCE

 0459

0°C  30°C



STERILE A



CNOT1259