

Fronte
CNOT1137
Formato: 150 x 315 mm
Colore: pantone 294 C

PHYSIOMER®

La soluzione naturale ed efficace per respirare meglio.

100%
Siero di Mare






PHYSIOMER è la linea completa di prodotti naturali per l'igiene del naso che conserva la naturale azione decongestionante dell'acqua di mare di Saint-Malo, permettendo di alleviare efficacemente i sintomi delle affezioni nasali e della zona sinusale senza effetti collaterali.

Il "siero di mare" PHYSIOMER è composto al 100 % da acqua di mare desalinizzata, ultrafiltrata e resa sterile in laboratorio, e conserva una combinazione completa di oltre 80 minerali ed oligoelementi, compresi calcio, magnesio, ferro, rame, manganese, zinco. Tutti questi minerali conferiscono a PHYSIOMER un'azione anti-infiammatoria (che limita la diffusione delle infiammazioni) e rigenerante (effetto eutrofico), di gran lunga superiori a quelle delle comuni soluzioni saline.

PHYSIOMER allevia efficacemente i sintomi delle affezioni nasali e della zona sinusale dovuti ad infezioni alle vie respiratorie ed uditive, contribuisce alla riduzione dell'utilizzo di farmaci e riduce il manifestarsi di raffreddori e infezioni secondarie. Utilizzato quotidianamente, PHYSIOMER umidifica la mucosa nasale e preserva il funzionamento naturale delle cavità nasali.

Privi di agenti chimici e conservanti, i prodotti della linea PHYSIOMER non pregiudicano il corretto funzionamento della mucosa nasale. La soluzione può essere utilizzata per periodi lunghi, ogniqualvolta necessaria senza alcun effetto collaterale o effetto rebound. PHYSIOMER aiuta a ridurre l'utilizzo di decongestionanti a base di farmaci o antibiotici, che possono generare resistenza batterica.

Grazie alla sua gamma completa, PHYSIOMER è la soluzione naturale ed efficace per tutta la famiglia, adatta per il trattamento di tutti i tipi di patologie delle vie respiratorie superiori :

Età	Prodotti	Formula	Azione - Benefici
Dalla nascita	Linea Baby Spray Nebulizzato ⁽¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed isotonica con una concentrazione di sale pari a 9 g/l di cloruro di sodio. - Spray Nebulizzato : 115 ml acqua di mare q.b.a 115 ml. - Sterile e senza conservanti. - pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale. 	Una gamma dedicata ai neonati per l'igiene quotidiana ed in caso di raffreddore.
Da 1 mese d'età	BABY IPER ⁽¹⁾ Spray nasale Decongestionante Non contiene farmaci 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed ipertonica con una concentrazione di sali minerali pari a 22 g/l. - 115 ml acqua di mare q.b.a 115 ml. - Sterile e senza conservanti. - pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale. 	Soluzione ipertonica per neonati per alleviare efficacemente la congestione nasale e rimuovere il muco in eccesso dovuto a raffreddore, sinusiti e riniti.
Adulti Bambini dai 2 anni d'età	Getto Normale ⁽¹⁾ Igiene quotidiana Prevenzione attiva 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed isotonica con una concentrazione di sale pari a 9 g/l di cloruro di sodio. - 135 ml acqua di mare q.b.a 135 ml. - Sterile e senza conservanti. - pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale. 	Rimuove le secrezioni nasali fluide o abbondanti dovute al raffreddore o a qualsiasi altra infezione nasale. Ideale nell'utilizzo quotidiano per detergere e mantenere umida la mucosa nasale, e per prevenire raffreddore, influenza o riniti allergiche.
	PHYSIOMER IPER 135 ml e 20 ml ⁽²⁾ Spray nasale Decongestionante Non contiene farmaci 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed ipertonica con una concentrazione di sali minerali pari a 22 g/l. - 135 ml acqua di mare q.b.a 135 ml. - Disponibile anche in formato tascabile da 20 ml. - Sterile e senza conservanti. - pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale. 	Libera il naso e allevia la pressione sui seni nasali senza alcun effetto collaterale. Sicuro per l'utilizzo durante la gravidanza e l'allattamento al seno. Adatto per sintomi cronici.
Adulti Bambini dai 10 anni d'età	Getto Forte ⁽¹⁾ Igiene quotidiana Prevenzione attiva 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed isotonica con una concentrazione di sale pari a 9 g/l di cloruro di sodio. - 210 ml acqua di mare q.b.a 210 ml. - Sterile e senza conservanti. - pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale. 	Rimuove le secrezioni nasali dense e/o purulente. Adatto per il trattamento post-operatorio.

Ultima revisione: Settembre 2018

 **laboratoire de la Mer**
Avenue du Général Patton
ZAC de la Madeleine
35400 Saint-Malo
FRANCE

DISTRIBUTORE :

Perrigo
Perrigo Italia S.r.l.
Via dell'Arte, 25
00144 Roma



STERILE A

CE 0459

0°C / 35°C ⁽¹⁾

0°C / 30°C ⁽²⁾

CNOT1137

Retro
CNOT1137
Formato: 150 x 315 mm
Colore: pantone 294 C

PHYSIOMER®

La soluzione naturale ed efficace per respirare meglio.

100%
Siero di Mare

POSOLOGIA RACCOMANDATA

Igiene quotidiana Prevenzione attiva

Nessuna restrizione d'uso: senza effetti collaterali o rischio di assuefazione.
Può essere utilizzato ogniqualvolta necessario.

PHYSIOMER

Baby Spray Nebulizzato 115 ml

- **Igiene e prevenzione delle infezioni nasali:**
Da 1 applicazione di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.
- **In caso di raffreddore o rinofaringite:**
4 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.

Getto Normale 135 ml

- **Per la prevenzione quotidiana:**
Da 1 o 2 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.
- **In caso di secrezioni fluide o abbondanti dovute a raffreddore o a qualsiasi altra infezione nasale:**
Da 4 a 6 applicazioni di 1-2 secondi al giorno o più se necessario in ciascuna narice.

Getto Forte 210 ml

- **In caso di secrezioni nasali dense, appiccicose, purulente o presenza di croste,**
- **In caso di disagi nasali cronici,**
- **Per il trattamento dopo chirurgia endonasale ed endosinusale:**
4 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.

Spray Nasale Decongestionante Non contiene farmaci

PHYSIOMER IPER

Spray Baby Ipertonico 115 ml

- **In caso di raffreddore, riniti o rinofaringiti:**
Da 2 a 3 applicazioni di 1 secondo al giorno in ciascuna narice.

Spray Ipertonico 135 ml

- **In caso di raffreddore, rinosinusiti o riniti allergiche:**
Da 2 a 3 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice, fino a 6 volte al giorno.

Spray Ipertonico 20 ml

- Fino a 6 applicazioni al giorno in ciascuna narice.

In caso di irritazioni nasali, un bruciore passeggero può manifestarsi durante l'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO

PHYSIOMER Baby Getto Nebulizzato e Baby IPER 115 ml

1. Distendere il bambino sulla schiena in posizione stabile, con la testa inclinata su un lato e la narice superiore rivolta verso di voi, ed introdurre delicatamente il beccuccio nella narice superiore. Non vaporizzare se la testa del bambino è inclinata all'indietro per evitare che la soluzione entri nella cavità errata.
2. Premere con decisione l'erogatore per 1 secondo. La soluzione potrebbe fuoriuscire dall'altra narice, segno che tutto il muco è stato correttamente rimosso. Ripetere con l'altra narice girando la testa del bambino dall'altro lato.
3. Sollevare il bambino per consentire al muco di uscire dal naso e pulire il nasino con un fazzoletto.

Se i sintomi nasali persistono nei bambini oltre i 5 giorni, consultare il proprio medico o farmacista.


Lavare il beccuccio con acqua calda dopo ciascun utilizzo ed asciugarlo con cura.
In caso di irritazioni nasali, un bruciore passeggero può manifestarsi durante l'uso.



PHYSIOMER Getto Normale, Getto Forte e PHYSIOMER IPER 135 ml

1. Posizionare la testa sopra il lavabo o nella doccia, inclinarla da un lato e introdurre delicatamente il beccuccio nella narice superiore. Premere con decisione l'erogatore per 1-2 secondi.
2. Lasciare agire la soluzione per qualche secondo.
3. Ripetere con l'altra narice girando la testa dall'altro lato.
4. Soffiare il naso.

Lavare il beccuccio con acqua calda dopo ciascun utilizzo ed asciugarlo con cura.

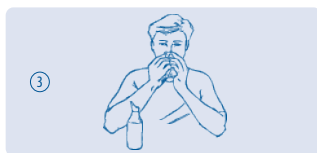

PHYSIOMER IPER 20 ml

1. Inclinare il flacone su un lato e premere con decisione l'erogatore per almeno 1 secondo. Ripetere questa operazione fino ad ottenere il primo spruzzo.
2. Applicare in ciascuna narice.
3. Soffiare il naso.

Lavare il beccuccio con acqua calda dopo ciascun utilizzo ed asciugarlo con cura.

Se i sintomi nasali persistono oltre 10 giorni in adulti e bambini, contattare un medico.

In caso di irritazioni nasali, un bruciore passeggero può manifestarsi durante l'uso.

ATTENZIONE: l'utilizzo da parte di più persone potrebbe comportare la diffusione dell'infezione.

Utilizzare entro 6 mesi dalla prima applicazione.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non utilizzare se la confezione ha perso il suo aspetto originale.