

PHYSIOMER®

La soluzione naturale ed efficace per respirare meglio.

100%
Siero di Mare

PHYSIOMER è la linea completa di prodotti naturali per l'igiene del naso che conserva la naturale azione decongestionante dell'acqua di mare di Saint-Malo, permettendo di alleviare efficacemente i sintomi delle affezioni nasali e della zona sinusale senza effetti collaterali.

Grazie alla sua gamma completa, PHYSIOMER è la soluzione naturale ed efficace per tutta la famiglia, adatta per il trattamento di tutti i tipi di patologie delle vie respiratorie superiori:

Età	Prodotti	Formula	Azione - Benefici
Dalla nascita	 Linea Baby Spray Nebulizzato⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none">- 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed isotonica con una concentrazione di sale pari a 9 g/l di cloruro di sodio.- Spray Nebulizzato : 115 ml acqua di mare q.b.a 115 ml.- Sterile e senza conservanti.- pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale.	Dedicato ai neonati per l'igiene quotidiana ed in caso di raffreddore.
Da 1 mese d'età	 Baby IPER⁽¹⁾ Spray Nasale Decongestionante Non contiene farmaci	<ul style="list-style-type: none">- 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed ipertonica con una concentrazione di sali minerali pari a 22 g/l.- 115 ml acqua di mare q.b.a 115 ml.- Sterile e senza conservanti.- pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale.	Soluzione ipertonica per neonati per alleviare efficacemente la congestione nasale e rimuovere il muco in eccesso dovuto a raffreddore, sinusiti e riniti.
Adulti Bambini dai 2 anni d'età	 Getto Normale⁽¹⁾ Igiene quotidiana Prevenzione attiva	<ul style="list-style-type: none">- 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed isotonica con una concentrazione di sale pari a 9 g/l di cloruro di sodio.- 135 ml acqua di mare q.b.a 135 ml.- Sterile e senza conservanti.- pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale.	Rimuove le secrezioni nasali fluide o abbondanti dovute al raffreddore o a qualsiasi altra infezione nasale. Ideale nell'utilizzo quotidiano per detergere e mantenere umida la mucosa nasale, e per prevenire raffreddore, influenza o riniti allergiche.
	 PHYSIOMER IPER 135 ml⁽¹⁾ e 20 ml⁽²⁾ Spray nasale Decongestionante Non contiene farmaci	<ul style="list-style-type: none">- 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed ipertonica con una concentrazione di sali minerali pari a 22 g/l.- 135 ml acqua di mare q.b.a 135 ml.- Disponibile anche in formato tascabile da 20 ml.- Sterile e senza conservanti.- pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale.	Libera il naso e allevia la pressione sui seni nasali senza alcun effetto collaterale. Sicuro per l'uso durante la gravidanza o l'allattamento. Adatto per sintomi cronici.
Adulti Bambini dai 10 anni d'età	 Getto Forte⁽¹⁾ Igiene quotidiana Prevenzione attiva	<ul style="list-style-type: none">- 100 % acqua di mare naturale, non diluita ed isotonica con una concentrazione di sale pari a 9 g/l di cloruro di sodio.- 210 ml acqua di mare q.b.a 210 ml.- Sterile e senza conservanti.- pH adattato alla fisiologia della mucosa nasale.	Rimuove le secrezioni nasali dense e/o purulente. Adatto per il trattamento post-operatorio.

Ultima revisione: Settembre 2018

PHYSIOMER®

La soluzione naturale ed efficace per respirare meglio.

100%
Siero di Mare

POSOLOGIA RACCOMANDATA

PHYSIOMER IPER: Spray Nasale Decongestionante - Non contiene farmaci

Baby Spray Iper-tonico 115 ml

- **In caso di raffreddore, riniti o rinofaringiti:**

Da 2 a 3 applicazioni di 1 secondo al giorno in ciascuna narice.

Spray Iper-tonico 135 ml

- **In caso di raffreddore, rinosinusiti o riniti allergiche:**

Da 2 a 3 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice, fino a 6 volte al giorno.

Spray Iper-tonico 20 ml

PHYSIOMER : Igiene quotidiana - Prevenzione attiva

Nessuna restrizione d'uso: senza effetti collaterali o rischio di assuefazione. Può essere utilizzato ogniqualvolta necessario.

Baby Spray Nebulizzato 115 ml

- **Igiene e prevenzione delle infezioni nasali:**

1 applicazione di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.

- **In caso di raffreddore o rinofaringite:**

Da 3 o 4 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.

Getto Normale 135 ml

- **Per la prevenzione quotidiana:**

Da 1 o 2 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.

- **In caso di secrezioni fluide o abbondanti dovute a raffreddore o a qualsiasi altra infezione nasale:**

Da 4 a 6 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.

Getto Forte 210 ml

- **In caso di secrezioni nasali dense, appiccicose, purulente o presenza di croste,**

- **In caso di disagi nasali cronici,**

- **Per il trattamento dopo chirurgia endonasale ed endosinusale:**

4 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.

ISTRUZIONI PER L'USO

PHYSIOMER Getto Normale, Getto Forte e PHYSIOMER IPER 135 ml

1. Posizionare la testa sopra il lavabo o nella doccia, inclinarla da un lato e introdurre delicatamente il beccuccio nella narice superiore. Premere con decisione l'erogatore per 1-2 secondi. Lasciare agire la soluzione per qualche secondo.
2. Ripetere con l'altra narice girando la testa dall'altro lato.
3. Soffiare il naso.

Spray Iper-tonico 20 ml

1. Inclinare il flacone su un lato e premere con decisione l'erogatore per almeno 1 secondo. Ripetere questa operazione fino ad ottenere il primo spruzzo.
2. Applicare in ciascuna narice.
3. Soffiare il naso.

Lavare il beccuccio con acqua calda dopo ciascun utilizzo ed asciugarlo con cura.

ATTENZIONE: l'utilizzo da parte di più persone potrebbe comportare la diffusione dell'infezione.

Se i sintomi persistono oltre 5 giorni nei neonati e 10 giorni in adulti e bambini, contattare un medico. In caso di irritazioni nasali, un bruciore passeggero può manifestarsi durante l'uso. Utilizzare entro 6 mesi dalla prima applicazione. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare se la confezione ha perso il suo aspetto originale.

PHYSIOMER Baby Getto Nebulizzato e Baby IPER 115 ml

1. Distendere il bambino sulla schiena in posizione stabile, con la testa inclinata su un lato e la narice superiore rivolta verso di voi, ed introdurre delicatamente il beccuccio nella narice superiore. Non vaporizzare se la testa del bambino è inclinata all'indietro per evitare che la soluzione entri nella cavità errata.
2. Premere con decisione l'erogatore. La soluzione potrebbe fuoriuscire dall'altra narice, segno che tutto il muco è stato correttamente rimosso. Ripetere con l'altra narice girando la testa del bambino dall'altro lato.
3. Sollevare il bambino per consentire al muco di uscire dal naso e pulire il nasino con un fazzoletto.